

Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts.

Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt. Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden. Eine Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten. Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT[®]

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 071 81 / 47 50 6 - 99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT HoldUp



**Gürtel zur sicheren Unterstützung
bei der Mobilisation**



KUBIVENT[®]

Produkt-Beschreibung

Der Kubivent HoldUp Gürtel ist flexibel einsetzbar und unterstützt sowohl den Patienten als auch die Pflegekraft bei der Mobilisation.

Indikation / Zweckbestimmung

- Zur Ermöglichung des Positionswechsels im Bett durch eine Hilfs-/Pflegeperson
- Kraftminimiertes und rüchenschonendes Umsetzen von Personen aus dem Bett oder Stuhl durch die Pflegekraft
- Sicherung und Unterstützung der Patienten bei der Fortbewegung, Unterstützung der Eigenmobilität

Kontraindikation

Personen, die nicht frei sitzen können aufgrund von fehlender Körperspannung. Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Einsatz bei Pflegekraft: Der Gürtel wird um die Hüfte geschnallt und bietet dem Patienten durch seine 6 Griffe eine bequeme Möglichkeit des Festhaltens. Beispielsweise beim Aufrichten aus dem Bett oder Stuhl oder dem Umsetzen auf andere Sitzgelegenheiten.

Einsatz beim Patienten: Zur Unterstützung beim Umsetzen wird der HoldUp um die Hüfte des Patienten geschnallt. Die Griffe am Gürtel nutzt nun die Pflegekraft zum Greifen, um den Patienten durch einen Zug nach vorne (nicht nach oben) aufzurichten. Gleichzeitig kann der HoldUp auch als Sicherungsgurt verwendet werden. Bei Personen, bei denen die eigenständige Fortbewegung (Laufen) gefördert werden soll. Dabei wird der HoldUp um die Hüfte geschnallt, so kann die Pflegekraft den Patienten durch das Festhalten am Gürtel absichern und Sturzgefahr vermeiden.

- Wenn Ihnen die Anwendung der Transferhilfen nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller zu melden sind.

Technische Daten

Größe in cm	Artikelnummer	Gewicht in g
100 x 13	THHU10013	315

Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material Stoff: 100 % Polyester, beschichtetes Polyestergewirke



Reinigung

Der HoldUp kann in der Waschmaschine oder durch Handwäsche gewaschen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann der HoldUp mit einem Tuch abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden.

Reinigung in der Waschmaschine: Der HoldUp kann in der Waschmaschine bei 60°C gewaschen und im Wäschetrockner bei schwacher Temperatur getrocknet werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Desinfektion

Der HoldUp kann problemlos wisch- und flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Desinfektion in der Waschmaschine: Bei Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittelhersteller. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder auf der Packungsbeilage vom Desinfektionsmittel-Hersteller zu finden ist. Beachten Sie zudem unsere Wasch-Hinweise unter dem Punkt „Reinigung“.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Sicherheitshinweise

Beim Umsetzen von Personen besteht erhöhte Sturzgefahr. Das Umsetzen und Aufrichten von Personen sollte vom Fachpersonal vorgenommen werden. Unter besonderen Umständen sollte eine zweite Person zur Absicherung hinzugezogen werden. Rauchen und das Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.