

GRÖSSENAUSWAHL

Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit stehen bei den Hebetüchern von Drive DeVilbiss im Vordergrund. Das durchdachte Sortiment bietet Lösungen für alle gängigen Einsatzbereiche. Um das passende Hebetuch definieren zu können, muss jede Patientenversorgung immer individuell betrachtet werden.

Dieser Leitfaden ist nur eine Empfehlung und soll Ihnen helfen die gewünschte Hebetuch Größe zu finden.
(Eine vollständige Bewertung und Risikobeurteilung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden)

Haben Sie sich auf ein Hebetuchmodell festgelegt, müssen Sie als nächstes die Größe des Hebetuchs wählen. Hilfreich hierbei ist die Betrachtung der Körpergröße des Patienten, und unterstützend dazu, der Brust-oder Taillenumfang, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

UMFANG	HÖHE	HEBETÜCHER	FARBE
68 - 91 cm	129 - 150 cm	SMALL	ROT
79 - 104 cm	147 - 168 cm	MEDIUM	GELB
102 - 129 cm	165 - 178 cm	LARGE	GRÜN
124 - 150 cm	170 - 183 cm	EXTRA LARGE	BLAU

WIE MESSE ICH?

bitte benutzen Sie zum Messen ein Maßband und messen Sie wie folgt:

UMFANG

bei Männer messen Sie den Brustumfang (unter den Armen).
Bei Frauen messen Sie den Taillenumfang.

GRÖSSE

ermitteln Sie die Größe am besten wenn der Patient liegt. Messen Sie wie folgt:

Nacken zum Kreuzbein, Kreuzbein zur Kniekehle und Kniekehle zur Ferse.

Wenn der Umfang und die Größe des Patienten bekannt sind, können sie anhand der Tabelle das passende Hebetuch aussuchen.

Fehlt eine Kombination oder haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich sehr gerne an Ihren gewohnten Drive DeVilbiss Ansprechpartner, oder unseren Produktspezialisten.

Die Maße

