

R225 / R225 XL

Rollator XL



Gebrauchsanweisung



Leben in Bewegung

Version 4.0 | 05.2022

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses!

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Die aktuelle Gebrauchsanweisung zur vergrößerten Darstellung kann bei Ihrem Fachhändler angefordert werden.

Modell	Art. Nr.
R225 Rollator	14000053
R225 XL SB60 Rollator Sitzbreite 60 cm	14000054
R225 XL SB65 Rollator Sitzbreite 65 cm	14000055

Lieferumfang

- Verpackungs- und Transportkarton
- Rollator
- Einkaufskorb
- Gebrauchsanweisung

Der Rollator R225 / R225 XL wird montiert in einem Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Produktbeschreibung



Zweckbestimmung

Der Rollator R225 / R225 XL dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen im häuslichen Bereich oder im Freien. Der Rollator verfügt über gepolsterte Sitzfläche und Rückenbügel, was dem Anwender ermöglicht sich bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

Indikation

- Versorgung bei:
- Gehbehinderung
 - Stark eingeschränkter Gehausdauer

Kontraindikation

- Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei:
- Wahrnehmungsstörungen
 - starken Gleichgewichtsstörungen
 - Sitzunfähigkeit



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Alle Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden!
- Die maximale Belastbarkeit (Benutzergewicht und Zuladung) von 225 kg darf nicht überschritten werden!
- Der Rollator ist nur als Gehhilfe einer Person geeignet.
- Der Transport von Lasten oder Personen ist nicht erlaubt!
- Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden!
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn die Faltsicherung korrekt eingerastet ist.
- Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Rollator auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben, um riskante Situationen zu vermeiden
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren (Beachten Sie bitte den Wartungsplan, Seite 6).
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Betätigen Sie die Feststellbremsen, bevor Sie den Gehwagen als Sitz nutzen!
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen beim Sitzen oder Beladung (Einkaufskorb) vergrößert werden.
- Kipprisiko: hängen Sie keine Taschen an die Griffe oder andere Teile des Rollators!
- Klemmgefahr: beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden!
- Die Oberflächen des Rollators können sich bei direkter Sonneneinstrahlung aufheizen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Nicht auf Treppen oder Rolltreppen verwenden!
- Nicht auf das Produkt stellen!
- Der Sitz des Rollators dient nur dem vorübergehenden Ruhen!
- Durch Sand, Meerwasser oder Streusalz können die Lager der Räder beschädigt werden. Reinigen Sie den Rollator gründlich, wenn er solchen Bedingungen ausgesetzt war! (Beachten Sie die Reinigungshinweise auf der Seite 7)
- Bei Einlagerung achten Sie darauf, dass der Rollator trocken, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert wird (Lagerungsbedingungen s. Seite 3). Der Rollator soll dabei gegen ein ungewünschtes Wegrollen gesichert werden.
- Vor jedem Wiedereinsatz und nach längerer Produktlagerung (mehr als 4 Monate) sollen **alle** im Wartungsplan aufgelistete Maßnahmen (Seite 6) durchgeführt werden



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, indem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktaufkleber

Hersteller	 TRENDMOBIL GmbH Fohling 24 D-33106 Paderborn www.trendmobil.com	 2022/05	Herstellungsjahr /-Monat
Produktname	Typ: R225 Max. Belastbarkeit: 225 kg/ Max. Belastung Korb: 3 kg		Kennzeichen Medizinprodukt
Seriennummer	  TM1453-22-W0xxxx		Warnhinweise beachten
EAN-Barcode	EAN  4 260485 210653	 73cm  	Kennzeichen CE Für Innen- und Außenbereich geeignet
		Max. Breite	Gebrauchsanweisung beachten



Der Produktaufkleber ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Er darf nicht entfernt werden. Sollte der Produktaufkleber unlesbar werden oder verloren gegangen sein, muss er ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Rollator R225 / R225 XL		
Sitzbreite (cm)	R225	55
	R225 XL SB 60	60
	R225 XL SB 65	65
Breite (cm)	R225	73
	R225 XL SB 60	80
	R225 XL SB 65	85
Länge (cm)	R225	64
	R225 XL SB 60	64
	R225 XL SB 65	64
Griffhöhe (cm)	R225	80 – 96
	R225 XL SB 60	80 – 96
	R225 XL SB 65	80 – 96
Gewicht (kg)	R225	11,5
	R225 XL SB 60	12,0
	R225 XL SB 65	13,5
Sitzhöhe (cm)		56
Max. zulässiger Winkel zwischen Längsmittellinie des Griffs und Bewegungsrichtung (Grad)		0
Zuladung Einkaufskorb (kg)		3
Max. Belastbarkeit (kg)		225
Bereifung		PU-Bereifung
Material		Rahmen: Stahl (lackiert) Sitzfläche: Kunstleder
Farbe		silber
Lagerungsbedingungen (C°)		0 bis + 45

Individuelle Anpassungen

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator R225 / R225 XL wird vormontiert geliefert.

1. Entfernen Sie die Schraube und Sternmutter vom Rahmen.
2. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen.
3. Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden.
4. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit durch Einstecken der Schraube und ziehen Sie die Sternschraube fest an. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.



Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, klappen Sie zunächst die Sitzfläche nach vorne. Hängen Sie die Haken des Einkaufskorbs in den Rahmen.

Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht!



Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremsen kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremsen härter) oder hinein (Bremsen weicher).

Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren!



Feststellbremsen

Um Ihren Rollator gegen ungewolltes Wegrollen zu sichern, betätigen Sie die Feststellbremse. Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt.

Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus.



Handhabung

Aufstellen

Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator.

Drücken Sie die Querstreben nach unten und klappen Sie die Sitzfläche nach unten.



Feststellbremsen

Um Ihren Rollator gegen ungewolltes Wegrollen zu sichern, betätigen Sie die Feststellbremse. Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten.

Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt.

Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus.



Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff.

Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.



Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen. Klappen Sie den Sitz nach oben. Nehmen Sie den Einkaufskorb heraus und ziehen die Querstreben nach oben.

Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen.





Instandhaltung / Wartung

Hinweise für die Fachhändler

Obwohl alle unsere Produkte strenger Qualitätskontrolle unterliegen, weisen wir darauf hin, dass alle Teile und Funktionen des Rollators vor der Abgabe an den Nutzer gründlich geprüft werden müssen. Insbesondere ist auf folgende Punkte zu achten:

- Alle Räder berühren den Boden,
- Alle Räder laufen frei,
- Alle Schrauben sind fest angezogen, besonders die Achsschrauben,
- Feststellbremse und Handbremse funktionieren einwandfrei,
- Klappmechanismus funktioniert einwandfrei.

Eine gründliche Wartung des Produkts sollte mindestens einmal jährlich nach unten aufgeführten Wartungsplan erfolgen und bei der Übergabe an weiteren Nutzer (Wiedereinsatz, S. 7).

Die autorisierte Fachhändler dürfen die Reparaturen nur mit Originalersatzteilen durchführen

Hinweise für die Benutzer

Damit die Nutzung des Rollators jederzeit sicher ist, empfehlen wir regelmäßig deren Zustand und die Funktionen zu überprüfen.

Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

Prüfen Sie **vor jeder Verwendung** die Funktionalität der Bremse. Machen Sie dies mit größter Vorsicht und Gewissenhaftigkeit. Sollten Sie eine Veränderung der Eigenschaften bemerken, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Eine nicht 100%-ig funktionierende Bremse birgt große Gefahren für Ihre Gesundheit!

Sollten Sie als Nutzer einen Fehler am Produkt entdecken oder bemerken Sie eine Funktionseinschränkung, wie z.B. Schwergängigkeit der Räder, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Es dürfen keine Reparaturen am Produkt durch den Benutzer vorgenommen werden!

Für nicht autorisierte Veränderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.



Wartungsplan

Maßnahme	Durch Benutzer	Durch Fachhandel
	Vor jeder Verwendung	bei der Übergabe / jährlich
Funktionalität der Räder kontrollieren	x	x
Funktionsstüchtigkeit der Bremse kontrollieren	x	x
Klappmechanismus funktioniert einwandfrei	x	x
Faltsicherung ist korrekt eingerastet	x	x
Rahmenteile sind unversehrt	x	x
Schrauben zur Fixierung des Sitzes sind fest angezogen	x	x
Alle Schrauben zur Fixierung der Räder sind fest angezogen	x	x

Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

Der Rollator kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden.

Achtung! Keine Drahtbürste verwenden!

Verwenden Sie keine Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung!

Wiedereinsatz

Der Rollator R225 / R225 XL ist für den Wiedereinsatz geeignet.

Beachten Sie, dass Sie auch sämtlichen für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Der Rollator muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Produktlebensdauer

Wir gehen von einer Produktlebensdauer von **fünf Jahren** aus. Voraussetzung ist, dass das Produkt unter Beachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben in der Bedienungsanleitung bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen **24 Monaten** ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produktes und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Händler.



Ihr Fachhändler:



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn Deutschland
Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0
Telefax: +49 (0) 5254-9479-299
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com